



DÉSINFECTION RAPIDE
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX
NON INVASIFS
ET NON IMMERGEABLES



PROPRIÉTÉS:

Produits prêts à l'emploi
Large spectre d'activité microbiologique
Fabriqué en France
Fabriqué sous système de management de la qualité certifié NF EN ISO 13485

DOMAINES D'APPLICATION:

Aseptonet est une gamme de produits destinés à la désinfection rapide des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables (petit matériel médical et dentaire) dans les hôpitaux, cabinets médicaux, cabinets dentaires,

laboratoires, maisons de retraite, ambulances...

ACTIVITÉ DE LA LOTION TEMPS D' ACTIONS EN CONDITIONS DE PROPRETÉ

TRAITEMENT GÉNÉRAL

Bactéricide	EN 13727* - EN 14561* EN 14561 : MRSA	5 min
Fongicide	EN 14562 : Aspergillus fumigatus	5 min
Levuricide	EN 13624 - EN 14562 : Candida Albicans	5 min
Tuberculocide	EN 14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae	15 min
Virucide	EN 14476* : HBV-HCV-Adenovirus - Coronavirus - Norovirus - VRS - H1N1 - HSV1 EN 14476 : Polyomavirus EN 14476 : Rotavirus	1 min 1 min 15 min

USAGES ADDITIONNELS

Bactéricide	EN 1276 EN 13697	30 sec 5 min
Levuricide	EN 1650* - EN 13697 : Candida albicans	5 min

*en conditions de saleté

MODE D'EMPLOI:

Lingettes: Passer la lingette sur le matériel et laisser agir 30 secondes à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas rincer. A utiliser dans les 3 mois après ouverture. Porter des gants pendant utilisation.

Spray: Pulvériser le produit sur le matériel. Laisser agir 30 secondes à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer. Laisser sécher à l'air libre. Essuyer l'excédent avec du papier absorbant propre. Porter des gants pendant utilisation.

Bidon: Répartir généreusement le produit sur le matériel. Laisser agir 30 secondes à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer. Laisser sécher à l'air libre. Essuyer l'excédent avec du papier absorbant propre. Porter des gants pendant utilisation.

DONNÉES PRODUITS:

Flow pack de 100 lingettes
Référence article sur demande
Lingettes: 18x20cm - Unités par carton: 12 - Unités par palette: 600

Boîte de 100 lingettes
Référence article sur demande
Lingettes: 13x19cm - Unités par carton: 12 - Unités par palette: 1080

Recharge de 100 lingettes
Référence article sur demande
Lingettes: 13x19cm - Unités par carton: 12 - Unités par palette: 1596

Spray de 750ml
Référence article sur demande
Unités par carton: 6 - Unités par palette: 600

Bidon de 5L
Référence article sur demande
Unités par carton: 1 - Unités par palette: 120



COMPOSITION:
- désinfectants : Ethanol (n° CAS 64-17-5), Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammonium chloride (n° CAS 68424-85-1), Propan-2-ol (n° CAS 67-63-0)
- moins de 5% d'agents de surface non ioniques
- parfum dont limonène