



NETTOYAGE
ET DÉSINFECTION RAPIDE
DES MATÉRIAUX ET SURFACES



PROPRIÉTÉS :

Produits prêts à l'emploi
Large spectre d'activité microbiologique
Parfum frais d'eucalyptus
Fabriqué en France

DOMAINES D'APPLICATION :

Aseptonet est une gamme de produits destinés à la désinfection rapide :
- Des surfaces dures des dispositifs médicaux dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement : lits médicalisés, monitoring, connectiques et câbles...
- Des surfaces dures en milieu médical (cabinets médicaux, dentaires, de kinésithérapie, laboratoires ...) ou collectif ou accueillant du public (salons de coiffure, maisons de retraite, commerces, collectivités...) : poignées de portes, plans de travail, sièges, fauteuils, chaises, tables, toilettes, téléphones, sols...

ACTIVITÉ DE LA LOTION		TEMPS D'ACTIONS EN CONDITIONS DE PROPRETÉ À 20°C	
Traitement Général	Normes	Germes testés	
Bactéricidie	EN 13727* EN 1276** - EN 13697*	S. Aureus - P. Aeruginosa - E. Hirae S. Aureus - P. Aeruginosa - E. Coli - E. Hirae	5 min
Levuricidie	EN 13624* - EN 1650** - EN 13697*	C. Albicans	5 min
Bactéricidie & Levuricidie	EN 16615*	S. Aureus - P. Aeruginosa - E. Hirae - C. Albicans	5 min
Actif sur virus	EN 14476* EN 16777*	Vaccinia - Herpès - PRV - BVDV - Coronavirus - HIV - Rotavirus Vaccinia	5 min

* 3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton ** 3g/L albumine bovine

MODE D'EMPLOI :

Lingettes

Passer 3 à 4 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 min.
Ne pas rincer. Renouveler l'application chaque fois que nécessaire. Se référer au mode d'emploi sur le produit. Se laver soigneusement les mains après utilisation.

Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux).

DONNÉES PRODUIT :

- Flow pack de 100 lingettes
- Référence article et FDS sur demande
- Lingettes : 18x20cm
- Unités par carton : 12
- Unités par palette : 600

COMPOSITION :

- Didecyltrimethylammonium chloride (n°CAS : 7173-51-5) : 0.29% (m/m) ;
- Moins de 5% d'agents de surfaces non ioniques ;
- Parfum



Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Usage réservé aux professionnels.